

เครื่องปั่น Amalgam รุ่น A.MAX AM-1

1. ขอบ่งใช้ เครื่องสำหรับปั่นอมัลกัม
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ปั่น อมัลกัม ก่อนนำไปใช้ในงานอุดฟัน
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 ใช้งานได้ง่าย
 - 3.2 มีรูปร่างที่สวยงาม
 - 3.3 ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 - 3.4 สามารถควบคุมเวลา และมีอัตราการปั่นที่แน่นอนคงที่
 - 3.5 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรฐาน
 - 3.6 ระหว่างปั่นมีเสียงที่เงียบ ตั้งแต่เริ่มทำงานจนจบการทำงาน
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 I/P : DC 24V 1.5A 36W
 - 4.2 Adapter : Input AC100 – 240V 50/60Hz
 - 4.3 ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 – 30 วินาที
 - 4.4 สามารถตั้งค่าความจำได้สองความจำ
 - 4.5 Operation Temperature : 10 – 40 C
 - 4.6 Dimension : 210mm X 200mm X 150mm
 - 4.7 น้ำหนัก : 2.9 กิโลกรัม
5. คุณลักษณะที่โดดเด่น
 - 5.1 มีความเร็วในการปั่นที่สูงควบคุมโดย Microprocessor
 - 5.2 มีหน้ากักปิดระหว่างการปั่น และเครื่องปั่นจะหยุดทำงานทันทีที่เปิดฝาเครื่อง
 - 5.3 ออกแบบให้มีการจับแฉกซูลที่มั่นคงและสามารถใส่และหยิบออกได้อย่างง่ายดาย
 - 5.4 ออกแบบให้รักษาและทำนุบำรุงได้ง่าย
 - 5.5 ให้ความเร็วที่มั่นคง
 - 5.6 ระหว่างการทำงานให้เสียงที่เงียบเพื่อบรรยากาศการทำงานที่ดี
6. ขั้นตอนการใช้งาน
 - 6.1 เริ่มการทำงานโดยกด Main Power Switch.
 - 6.2 พอกดเปิด เครื่องจะตั้งที่ Mode1 ซึ่งตั้งไว้ที่ 10 วินาทีโดยอัตโนมัติ
 - 6.3 สามารถตั้งเวลาต่างๆด้วยการกดปุ่ม + หรือ - ได้ที่เป็นบังคับ
 - 6.4 เวลาสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 – 30 วินาที และสามารถให้เครื่องจำได้ สองโหมด (Mode1,2)
 - 6.5 เมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำ อมัลกัม แคลปซูลใส่ และปิดฝากัน แล้วกด Start/Stop เพื่อดำเนินการ
7. หน้าจอแสดงผล
 - 7.1 มีหน้าจอแสดงผลวินาที เป็นแบบ ดิจิตอล
 - 7.2 มีปุ่ม SET เพื่อ เลือก Mode ที่ตั้งไว้ ได้สูงสุด 2 โหมด
 - 7.3 มีปุ่ม Time + , - สำหรับการตั้งวินาทีด้วยตัวเอง
 - 7.4 มีปุ่มทำงานและหยุดการทำงาน (Start / Stop)
8. การประกันคุณภาพ
 - 8.1 มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต ระยะเวลารับประกัน 1 ปี
 - 8.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาจากผู้ผลิต